

SWL 300kg

SlingBar er en serie løftebøyler som kombineres med en mobil eller stasjonær løfter som er godkjent av Handicare. Løftebøylene finnes i tre ulike størrelser, og benyttes sammen med en korrekt tilpasset løftesele til løft av brukere.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



## Kontroll av funksjon

### Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller. Kontroller at materialet er helt og skadefritt. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

## Produktbeskrivelse av SlingBar


SlingBar er produsert i aluminium.

SlingBar kombineres med en mobil eller stasjonær løfter som er godkjent av Handicare. Løftekrokene er utrustet med avkrokingsvern.




SlingBar S er 35 cm bred og passer frem for alt til barn, tynne personer eller ved gåtøring.

(Varenummer: 70200001)

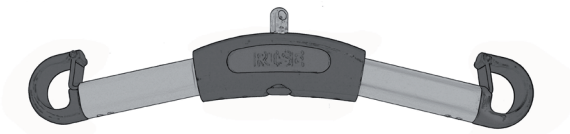

SlingBar M er 45 cm bred og passer i de fleste forflytninger.

(Varenummer: 70200002)

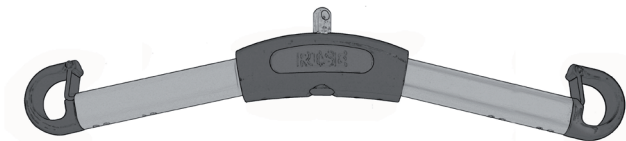


SlingBar L er 60 cm bred og passer brukere som trenger god plass i løfteselen,

f. eks. trykkfølsomme, bredskuldrede eller overvektige brukere. (Varenummer: 70200003)


### Montering av SlingBar på en mobil løfter:

- 1 x 90000038 (Skrue M8x50)
- 1 x 90000026 (Mutter M8)
- 2 x 90000124 (Skive til plastpropp M10)
- 2 x 90000014 (Plastpropp M10)

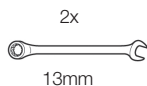

### Montering av SlingBar på stasjonær løftemotor:

- 1 x 90000038 (Skrue M8x50)
- 1 x 90000026 (Mutter M8)
- 2 x 90000124 (Skive til plastpropp M10)
- 2 x 90000014 (Plastpropp M10)

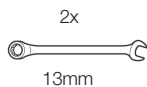

## Maksimumslast

De ulike produktene i den sammensatte løfteenheten (løfter, løftebøyle, løftesele, vekt og eventuelt annet løftetilbehør) kan ha forskjellige maksimumslaster. Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

## Rengjøring

Ved behov rengjøres løftebøylen med varmt vann eller vaskesprit. Benytt ikke rengjøringsmidler som inneholder fenol eller klor. Dette kan skade materialet.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

