


# Mover Aqua

FORFLYTNINGSPLATFORM

Mover er en forflytningsplatform, der er designet til at sikre bekvem og ubesværet forflytning inden døre og/eller på et glat underlag. Den er let at anvende og hjælper med til at forflytte patienter på en sikker og bekvem måde. Mover har en smal basisramme og dobbelte styrehjul, der gør det nemt at manøvrere selv på begrænset plads. Mover har en stabil platform og komfortable sæde-puder, og da der hele tiden er øjenkontakt med plejepersonen, kan brugeren føle sig veltilpas og tryk. Den nye Mover Aqua er specielt designet til anvendelse ved/i brusebad. PU-sæder sikrer i kombination med udformningen i rustfrit stål, at dette er muligt. Det er samtidig blevet lettere at sikre, at hygiejnen er i orden.

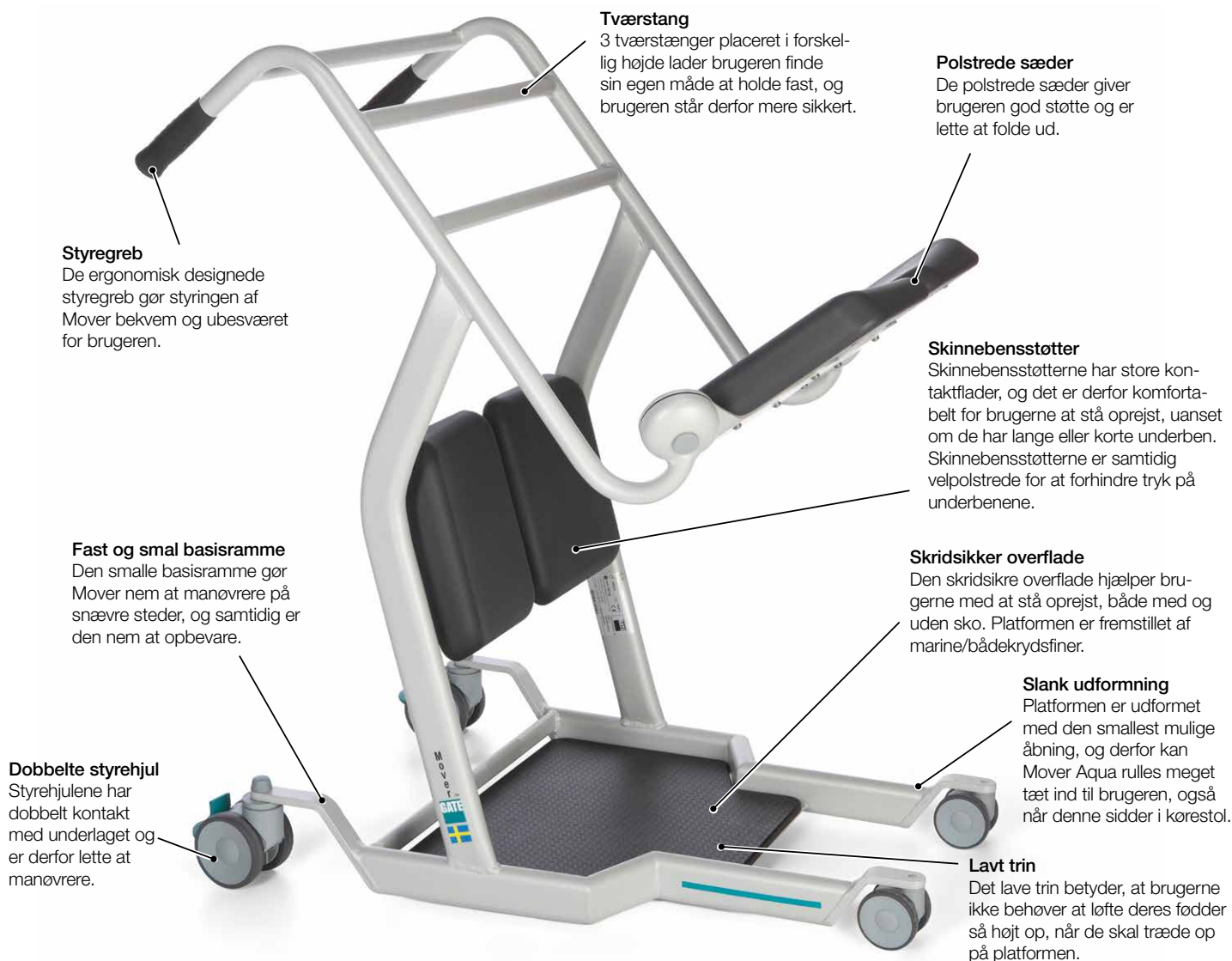

## Styregreb

De ergonomisk designede styregreb gør styringen af Mover bekvem og ubesværet for brugeren.

## Tværstang

3 tværstænger placeret i forskellig højde lader brugeren finde sin egen måde at holde fast, og brugeren står derfor mere sikkert.

## Polstrede sæder

De polstrede sæder giver brugeren god støtte og er lette at folde ud.

## Skinnebænsstøtter

Skinnebænsstøtterne har store kontaktflader, og det er derfor komfortabelt for brugerne at stå oprejst, uanset om de har lange eller korte underben. Skinnebænsstøtterne er samtidig velpolstrede for at forhindre tryk på underbenene.

## Fast og smal basisramme

Den smalle basisramme gør Mover nem at manøvrere på snævre steder, og samtidig er den nem at opbevare.

## Skridsikker overflade

Den skridsikre overflade hjælper brugerne med at stå oprejst, både med og uden sko. Platformen er fremstillet af marine/både-krydsfiner.

## Dobbelte styrehjul

Styrehjulene har dobbelt kontakt med underlaget og er derfor lette at manøvrere.

## Slank udformning

Platformen er udformet med den smalleste mulige åbning, og derfor kan Mover Aqua ruller meget tæt ind til brugeren, også når denne sidder i kørestol.

## Lavt trin

Det lave trin betyder, at brugerne ikke behøver at løfte deres fødder så højt op, når de skal træde op på platformen.

## Tekniske specifikationer

CE CE-mærkning iht. MDD 93/42/EØF.

Art.nr.	HMI-Nr.	Produkt	Maks. brugervægt	Bredde - udvendig	Bredde - trin	Højde	Længde	Sædehøjde	Vægt
53-301	118857	Forflytningsplatform Mover Aqua	180 kg	635 mm	380 mm	1070 mm	960 mm	800 mm	28 kg



WE DO BETTER.

Vil du gerne vide mere?  
Kontakt os på tlf. +46 (0)371 318 00  
Gate Rehab Development AB  
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele SVERIGE



GATE COLLECTION

DISTRIBUTØR AF GATE-PRODUKTER:



handicare

Making everyday life easier

Handicare A/S

Bredgade 45, 7400 Herning

Tel: 70 22 43 41

www.handicare.dk • info@handicare.dk

## Tekniske specifikationer

Pos.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
1	53-341	Endeskruer M10, Ø30 mm
2	53-342	Skrue, knæstøtteplade (x4)
3	53-344	Gummihåndtag, L=92 mm (x2)
4	53-311	Step Aqua
5	53-336	Skrue, sædeplade (x3)
6	53-337	Skrue, trin (x4)
7	53-338	Spændeskive, sædeplade (x3)
8	53-339	Låsemøtrik, M10
9	53-340	Spændeskive M10
10	53-312	Dobbelt styrehjul uden bremse Ø75 mm
11	57-096	Dobbelt styrehjul med fuld bremse "diameter" 100mm (Aqua)
12	53-343-L	Støtteplade, venstre sædeplade
13	53-343-R	Støtteplade, højre sædeplade
14, 15	57-394	Sæde/knæstøtte PUR (Aqua)
16	53-334	Spændeskive, knæstøtteplade (x4)
17	53-330	Låg/skrue, grå
18	53-331	Spændeskive

## Rengøring


Produktet skal rengøres/desinficeres regelmæssigt – om nødvendigt efter hver anvendelse eller mindst en gang om dagen. Rens produktet med en fugtig klud, der er vredet op i varmt vand og desinficerende rengøringsmiddel. Aftør grundigt, så alle overflader desinficeres.

Brug ikke klorin, fenoler, pentanoler eller andre kraftige rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen, udtørre puderne eller forårsage revner i betrækket.

## Genanvendelse/bortskaffelse

Når produktet ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes i overensstemmelse med loven/regulativerne for affaldshåndtering i det pågældende land. Alle elektriske dele, inkl. batterier, skal fjernes og bortskaffes som elektriske komponenter. (Bed din lokale genbrugsstation om flere oplysninger om, hvordan de forskellige materialer i produktet (metal, plastic, elektroniske dele) skal bortskaffes).

## Tekniske specifikationer

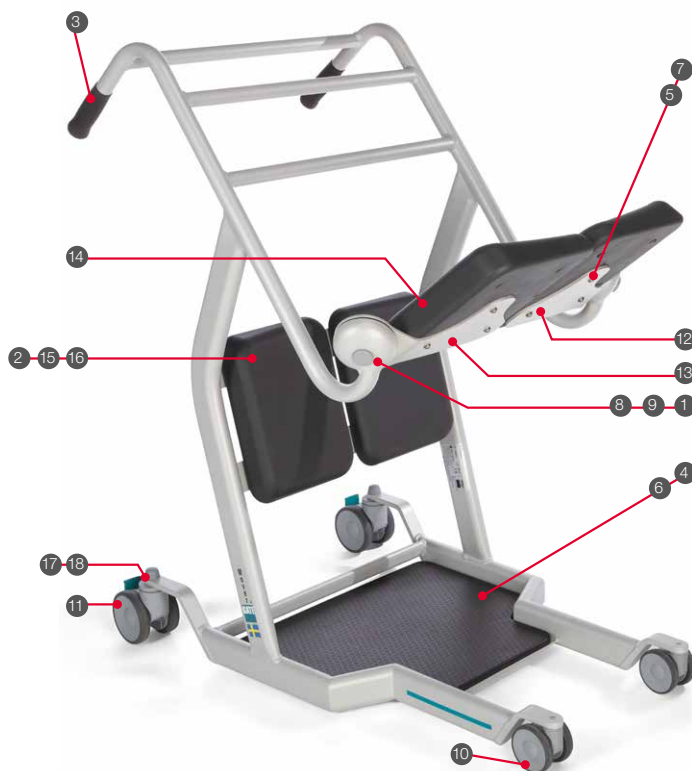

## Pleje og vedligeholdelse

### Plan for forebyggende vedligeholdelse

Hvis produktet, når det kontrolleres, har fejlbehæftede/defekte dele, må det ikke bruges, før de fejlbehæftede dele er blevet udskiftet.

Handling/Kontrol	Før hver anvendelse	Årligt eftersyn
Udfør en generel kontrol - afprøv produktets funktioner. Kontrollér at der ikke er defekte eller revnede dele. Kontrollér at produktet føles stabilt.	X	X
Kontrollér at halv-sæderne kan slås op/ned	X	
Kontrollér at de bagerste dobbelthjul kan roteres, og at bremserne virker.	X	
Kontrollér at trinnet sidder fast.	X	X
Kontrollér at dobbelthjulene er grundigt fastgjort til rammen.		X
Undersøg de udsatte dele for revner eller skarpe kanter (disse kan blive uhygiejniske eller skade modtageren af plejen)		X
Kontrollér at der ikke er løse boltede samlinger.		X
Reparér alle skader på malingen, så der ikke opstår korrosion af overfladen – dette gælder især Mover Aqua. Der kan bestilles maling til genopfriskning hos forhandleren.		X