


Mover Plus

FORFLYTNINGSPLATFORM

Mover er en forflytningsplatform, der er designet til at sikre bekvem og ubesværet forflytning inden døre og/eller på et glat underlag. Den er let at anvende og hjælper med til at forflytte patienter på en sikker og bekvem måde. Mover har en smal basisramme og dobbelte styrehjul, der gør det nemt at manøvrere selv på begrænset plads. Mover har en stabil platform og komfortable sædepuder, og da der hele tiden er øjenkontakt med plejepersonen, kan brugeren føle sig veltilpas og tryk. Mover Plus er vores basisversion, hvor materialevalg og maks. brugervægt har lavere specifikationer sammenlignet med Mover Aqua.

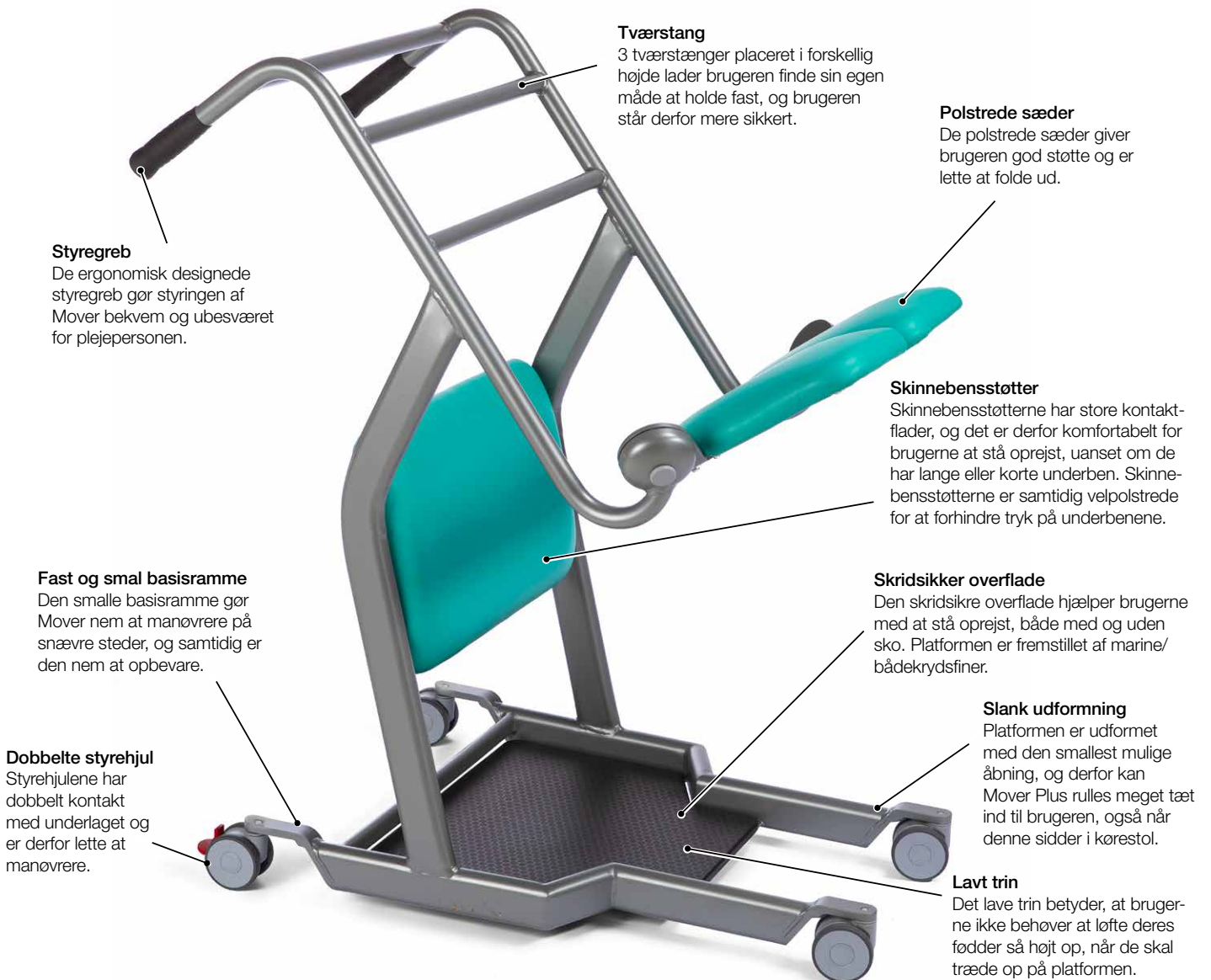

Tekniske specifikationer

CE CE-mærkning iht. MDD 93/42/EØF.

Art.nr.	HMI-Nr.	Produkt	Maks. brugervægt	Bredde - udvendig	Bredde - trin	Højde	Længde	Sædehøjde	Vægt
53-302	120315	Forflytningsplatform Mover Plus	150 kg	635 mm	380 mm	1070 mm	960 mm	800 mm	28 kg

GATE

WE DO BETTER.

Vil du gerne vide mere?
Kontakt os på tlf. +46 (0)371 318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele SVERIGE



GATE COLLECTION

DISTRIBUTØR AF GATE-PRODUKTER:



handicare

Making everyday life easier

Handicare A/S

Bredgade 45, 7400 Herning

Tel: 70 22 43 41

www.handicare.dk • info@handicare.dk

Tekniske specifikationer

Pos.nr.	Art.nr.	Beskrivelse
1	53-341	Endeskruer M10, Ø30 mm
2	53-342	Skrue, knæstøtteplade (x4)
3	53-344	Gummihåndtag, L=92 mm (x2)
4	53-350	Trin Plus
5	53-336	Skrue, sædeplade (x3)
6	53-337	Skrue, trin (x4)
7	53-338	Spændeskive, sædeplade (x3)
8	53-339	Låsemøtrik, M10
9	53-340	Spændeskive, M10
10	53-312	Dobbelt styrehjul uden bremse Ø75 mm
11	53-351	Dobbelt styrehjul med fuld bremse Ø75 mm
12	53-352-L	Støtteplade, venstre sædeplade
13	53-352-R	Støtteplade, højre sædeplade
14	53-353-L/R	Sædepude, Plus
15	53-354	Knæpude, Plus
16	53-334	Spændeskive, knæstøtteplade (x4)

Rengøring


Produktet skal rengøres/desinficeres regelmæssigt – om nødvendigt efter hver anvendelse eller mindst en gang om dagen. Rens produktet med en fugtig klud, der er vredet op i varmt vand og desinficerende rengøringsmiddel. Aftør grundigt, så alle overflader desinficeres.

Brug ikke klorin, fenoler, pentanoler eller andre kraftige rengøringsmidler, der kan beskadige overfladen, udtørre puderne eller forårsage revner i betrukket.

Genanvendelse/bortskaffelse

Når produktet ikke længere kan bruges, skal det bortskaffes i overensstemmelse med loven/regulativerne for affaldshåndtering i det pågældende land. Alle elektriske dele, inkl. batterier, skal fjernes og bortskaffes som elektriske komponenter. (Bed din lokale genbrugsstation om flere oplysninger om, hvordan de forskellige materialer i produktet [metal, plastic, elektroniske dele] skal bortskaffes).

Tekniske specifikationer

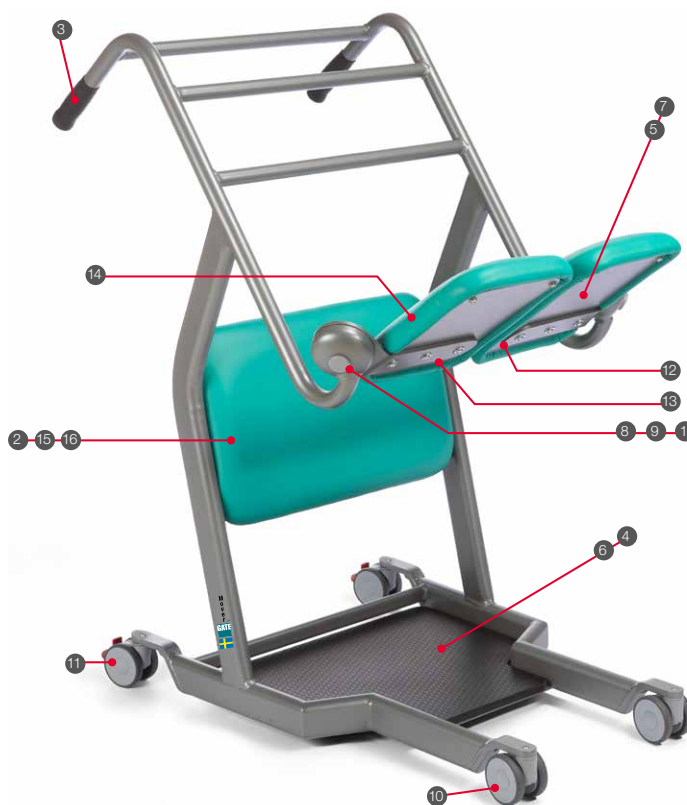

Pleje og vedligeholdelse

Plan for forebyggende vedligeholdelse

Hvis produktet, når det kontrolleres, har fejlbehæftede/defekte dele, må det ikke bruges, før de fejlbehæftede dele er blevet udskiftet.

Handling/Kontrol	Før hver anvendelse	Årligt eftersyn
Udfør en generel kontrol – afprøv produktets funktioner. Kontrollér at der ikke er defekte eller revnede dele. Kontrollér at produktet føles stabilt.	X	X
Kontrollér at halv-sæderne kan slås op/ned.	X	
Kontrollér at de bagerste dobbelte styrehjul kan roteres, og at bremserne virker.	X	
Kontrollér at trinnet sidder fast.	X	X
Kontrollér at de dobbelte styrehjul er grundigt fastgjort til rammen.		X
Undersøg de udsatte dele for revner eller skarpe kanter (disse kan blive uhygiejniske eller skade modtageren af plejen)		X
Kontrollér at der ikke er løse boltede samlinger.		X
Reparér alle skader på malingen, så der ikke opstår korrosion af overfladen – dette gælder især Mover Plus. Der kan bestilles maling til genopfriskning hos forhandleren.		X